


OMEGA-S6

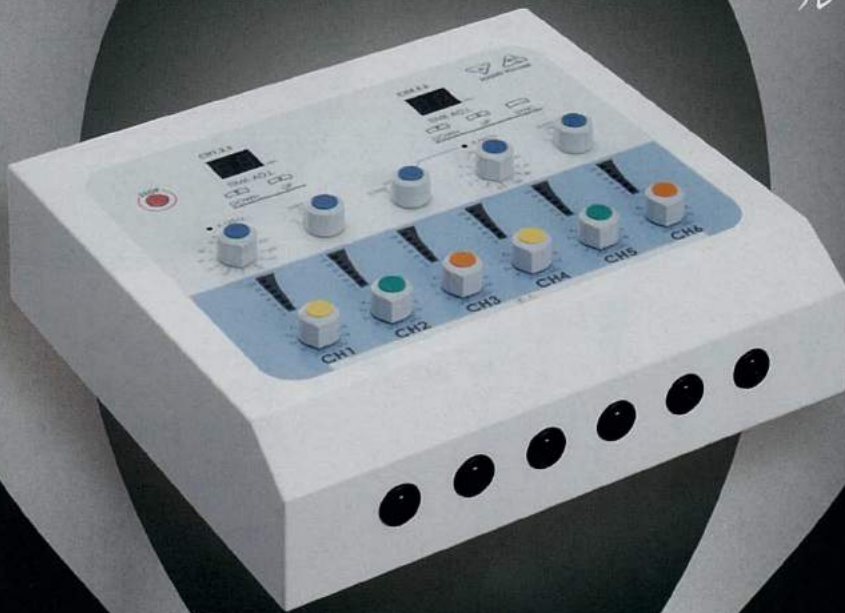

オメガが誕生。

低価格
省スペース
多チャンネル



オメガとは・・・

ギリシャ語最後の文字で『究極の』という意味です。




JOY
PERSONS
ACTIVE
LIFESTYLE

有限会社ジョイパル

先生や患者様に合わせてカスタマイズ

医療の現場での使いやすさを考慮した設計

OMGS6 は、6 チャンネルを搭載した理学診療用器具です。
豊富な機能と使いやすさを追求し、コンパクトで場所をとらない設計です。

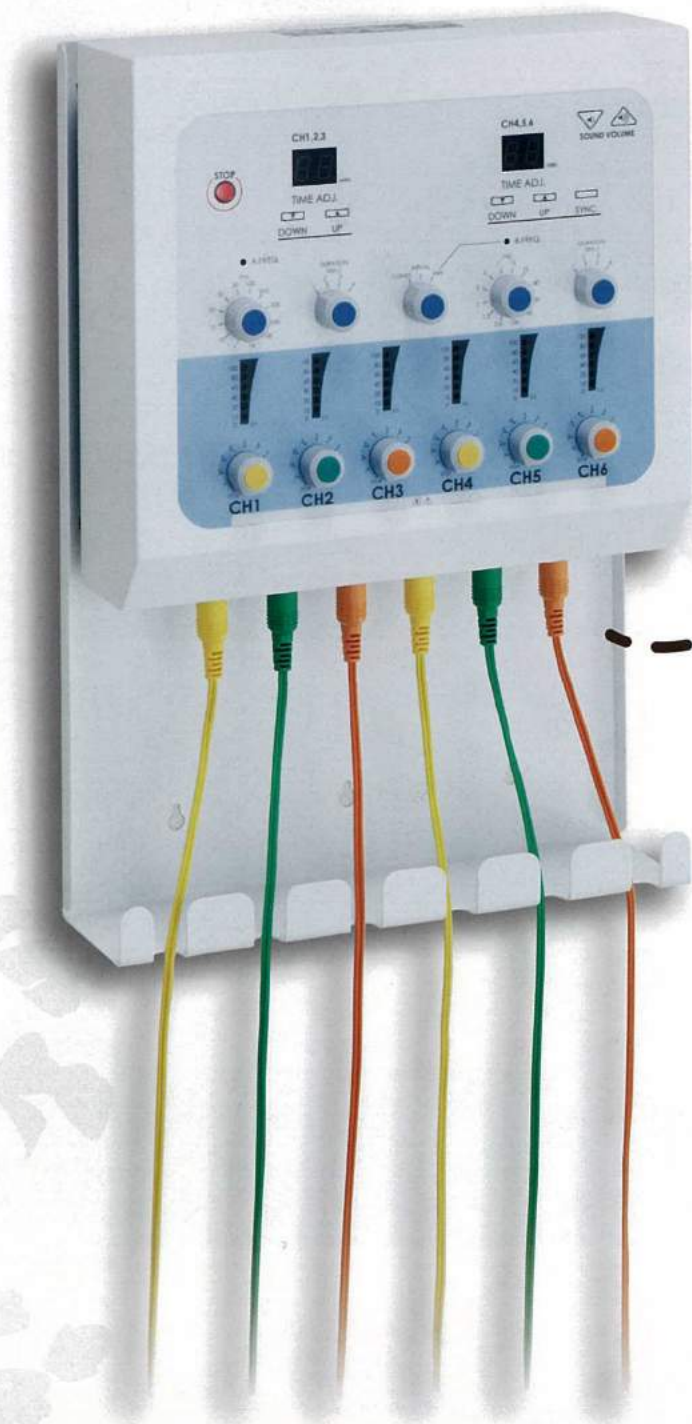

壁掛金具

壁面に取付けることができます。
製品のみを外し、持ち運ぶことも可能です。

コード掛けや、湿性導子を置くスペースなど医療の現場での使いやすさを考慮しました。

※壁掛金具はオプション品です。



設置について

水のかかるような場所には設置しないでください。
気圧、温度、湿度に注意してください。
ほこりがたまりやすい場所には設置しないでください。
直射日光が当たる場所には設置しないでください。
塩分、イオウ分などを含んだ空気がある場所には設置しないでください。
傾斜や振動のある場所、他の機器と接触するような場所には設置しないでください。
電源の周波数、電圧および許容電流値を確認したうえで設置してください。

3種類の出カモード

周波数や出力時間などの組み合わせで、症状にあわせた治療を行います。

連続 モード

1 ~ 1000Hz の幅広い周波数を選択できます。
症状にあわせた治療を行うことが可能です。

波形イメージ図



間歇 モード

間歇があることで、電気刺激に慣れにくく、
効果的な筋収縮を行います。



ミックス モード

1 ~ 1000Hz と、0.5 ~ 100Hz の2つの周波数を
選択して繰り返して出力します。
筋肉の表層から深層まで幅広く作用します。



からだの様々な部位に適応する導子

凹凸のある関節から広い腹筋まで対応できる様々な導子を使用することができます。



湿性導子

手首や肘などの導子装着面積が狭い関節にも
ご使用いただけます。

患部に導子をあて、マジックバンドで固定して
使用します。




グローブ導子

手の感触を大切にし、患部に触れ
ながら治療を行うことができます。



Vスティック

腰や肩など、ポイント的な
治療を行なうことができます。

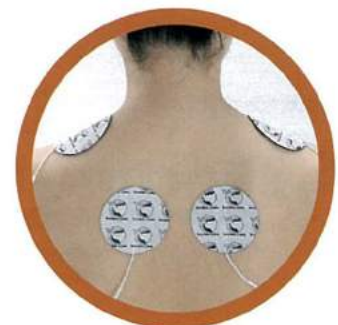

粘着導子

跡を残しにくく、柔軟性が
あるので、人目に触れる部位や
凹凸のある部位に。



※Vスティック、グローブ導子、粘着パッドはオプション品です。

OMEGA-S6



仕様

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 一般的名称 | 低周波治療器 |
| 機種名 | OMGS-6 |
| 認証番号 | 227AFBZX00028000 |
| 医療機器の分類 | 管理医療機器 特定保守管理医療機器 |
| 電撃に対する保護の形式 | クラスII機器 |
| 電撃に対する保護の程度 | BF形装着部 |
| 定格電圧及び電源周波数 | AC100 50/60Hz |
| 電源入力 | 40V |
| 最大出力電流 | 60mA _{rms} (500Ω負荷時) |
| 最大出力電圧 | 160V _{p-p} (500Ω負荷時) |
| 出力周波数 | 0.5Hz ~ 1kHz |
| 出力チャンネル数 | 6チャンネル |
| 治療時間 | 1 ~ 99分および連続 |
| 安全装置 | ゼロスタート方式 ストップスイッチ 過電流制御機能 |
| 寸法 | (高さ)100mm×(幅)320mm×(奥行き)290mm |
| 重量 | 3.5kg |

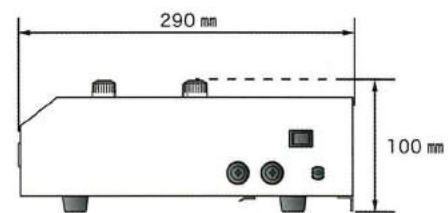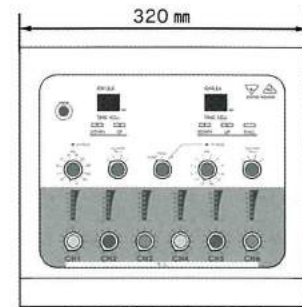

メーカー希望小売価格 580,000円

付属品

- A-2型湿性導子 PINタイプ (青・黄)
- A-2型湿性導子スポンジ (小)
- 導子コード PIN型 2.5m (太) (黄・橙・緑)
- マジックバンド 0.6m 標準幅
- マジックバンド 1.2m 標準幅

オプション品

- 壁掛金具
- B-2型湿性導子 PINタイプ
- 丸型湿性導子
- 粘着導子
- ポイントプローブ
- Vスティック
- グローブ導子

■製造販売業者・製造業者



Techno Link®

株式会社テクノリンク

www.techno-link.co.jp



本社 〒956-0804 新潟県新潟市秋葉区荻島2-30-15 TEL.0250-21-6251 FAX.0250-24-2151

■販売業者



有限会社ジョイパル
www.joypal.jp

〒270-2265 千葉県松戸市常盤平陣屋前 6-6

お問合せは
こちら **0120-320-234**
TEL.

医療従事者、販売代理店向け資料

※本誌の一部または全部を無断で複製複製することは著作権(著作権法第21条)の侵害にあたります。
また、それをインターネットなどで公開することも公衆送信権(著作権法第23条)の侵害にあたります。